



PUHASTAMINE & HOOLDUS





PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Flexineb seadme puhastamine koosneb kahest eraldi protseduurist: üks Flexineb E3 anuma jaoks ja teine komplekti teiste osade jaoks.

Flexineb E3 anum:

- Puhasta Flexineb E3 anum pärast igit kasutuskorda
- Kaitse elektroonikat alati läbipaistva korgiga
- Puhasta destilleeritud vee ja ühe tilga õrna nõudepesuvahendiga
- Loputa põhjalikult ja lase õhu käes kuivada
- Ära kasuta teravaid esemeid
- Ära kasuta tugevaid ega keemilisi puhastusvahendeid

Komplekti teised osad (Flexineb E3):

- Eemalda enne puhastamist elektroonilised komponendid (kontroller, kaabel, Flexineb E3 anum)
- Võta kogu komplekt puhastamiseks täielikult lahti
- Kasuta desinfitseerivat spreid ja vett, puhastades õrnalt osi ning vältides tugevaid kemikaale
- Loputa maski ja kambrite sisepind põhjalikult ning kuivata osad puhta paberrätikuga
- Hoia puhastatud osi jahedas ja kuivas kohas, tagades, et elektroonika jääb kuivaks ja kaitstuks

Nende puhastusjuhiste järgimine ja kaasasolevate abivahendite kasutamine aitab säilitada sinu Flexineb seadme puhtust ja töökindlust, tagades parima võimaliku jõudluse.